

KARISMA, enjekte edilebilir, steril, yeniden emilebilir bir tıbbi üründür. Yaslanmanın neden olduğu cilt çöküntüleri nedeniyle elastik kosulların restorasyonunu destekleyen dermisin hücre dışı matrisini oluşturan maddeler olan R-polipeptid alfa 1 kolajen zincirinin eklenmesiyle Hyaluronik Asit bazlıdır. İki maddenin kombinasyonu sıkılaştırma etkisi yaratarak cilt gevsekliği ile savaşı.

KULLANIM AMACI

KARISMA, küçük yara izlerini (örn. aknenin bıraktığı izleri) ve/veya travma sonrası/cerrahi operasyon sonrası ve cilt yaslması ve/veya hacim kaybına bağlı olarak yüzdeki cilt kusurlarının orta vadede düzeltilmesi için endikedir. Ve KARISMA, yüzdeki, dudaklardaki cilt kusurlarını azaltmak, konturlarını yeniden tanımlamak veya özellikle yapılandırılmamış bir deri altı dokusu bulunan kişiler için uygundur.

Dokulara yüz ve dudak sekilerinin dogallığını bozmadan mükemmel bir şekilde entegre olur. Hücresel stimülasyon, kademeli, görünür ve uzun süreli bir iyileşme ile cildin sıkılığını ve yapısını geri kazandırır. Formülasyonu, yüksek moleküler ağırlıklı hyaluronik asit varlığı ve amino asit zinciri R-polipeptid alfa1 ile sinerji içinde olması sayesinde, sıkılaştırıcı bir etki yaratarak cilt sarkması ile savaşı.

İÇERİK

Kollajen ve karboksimetelsesülozun alfa 1 - polipeptid R zincire ekli yüksek moleküler ağırlıklı hyaluronik asit.

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Intradermal in-ltrasyonlar için alınan önlemleri aynı şekilde alın. Deri içine yapılan her tedavide olduğu gibi, ürünün kullanımı enfeksiyon riski içerebilir. Tedavi sonucunda birkaç dakika içinde kaybolan hafif bir batma hissi olabilir. Tedavi edilen alan, enjeksiyon işlemlerinde yaygın olarak görülen sislik ve kızarıklık gibi reaksiyonlar gösterebilir. Bu reaksiyonlar birkaç saat sonra kendiliginden düzelecektir.

Genel olarak, doktorun teknik becerisi tedavinin başarısı için esastır. Bu belgede tanımlanan kullanım koşulları dışında bu ürünün herhangi bir şekilde değiştirilmesi veya kullanılması, ürünün sterilitesine ve performansına zarar verebilir ve dogru sonuçlar garanti edilemez.

Tedaviye başlamadan önce, ürünün kendisinin endikasyonları ve kontrendikasyonları, uyumsuzlukları ve oluşabilecek istenmeyen etkiler hakkında hastaya bilgi verilmesi önerilir. Enjeksiyondan önce, tedavi edilecek alanı iyice dezenfekte etmeye devam edin. Yavaşça enjekte edin. Bu önlemlere uyulmaması, luer kilit seviyesinde iğne sızıntısı ve/veya ürün kaybı riskine neden olabilir.

Enjekte edilecek ürün miktarı, işlem yapılacak alanın tipine bağlı olacaktır. Enjeksiyondan sonra, ürünün esit dağılımını sağlamak için tedavi edilen bölgeye masaj yapmak önemlidir.

KONTRENDİKASYONLAR

ÜRÜNÜ BELİRTİLENLER DISINDAKİ UYGULAMALAR İÇİN KULLANMAYIN.

- KARISMA'yı periorbital (göz kapakları, kaz ayakları) ve glabellar (alın) bölgelerine enjekte etmeyin.
- Kan damarlarına (intravasküler) enjekte etmeyin.
- Düzeltme işlemini asmayın.
- Ürüne karşı bireysel aşırı duyarlılık durumunda kullanmayın.
- Vasküler kollajenopatilerden ve bağ dokusunun otoimmün hastalıklarından muzdarip hastalarda kullanmayın.
- Devam eden enfeksiyon veya iltihaplanma olan cilt bölgelerine enjekte etmeyin.

- Spesi-k kontrendikasyonları bilinmese bile hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması önerilmez.
- Tıbbi tedavi yoluyla kontrol altına alınamayan epilepsisi olan hastalara enjeksiyon yapmayın.
- Hipertro-k yara izi geliştirme eğilimi olan veya por-risi olan hastalara enjeksiyon yapmayın.
- Dolgu maddesinin içerdigi maddelere karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalara enjeksiyon yapmayın.
- Çocuklarda kullanmayın.
- Ürünü lazer tedavisi, derin kimyasal peeling veya dermabrazyon tedavileriyle yakın zamanlı olarak kullanmayın. Yüzeysel peeling durumunda, inamatuvar reaksiyon ciddiye enjekte edilmemesi önerilir.

UYARILAR

Kullanıma hazır sıringanın içeriği sterildir. Sırınga kapalı bir blisterde paketlenmiştir. Sırınganın dış yüzeyi steril degildir. Paket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

Ambalaj açık veya hasarlı ise kullanmayınız. Enjeksiyon yeri sağlıklı cilt üzerinde olmalıdır. Damar yoluyla, kaslara, tendonlara veya meme büyütme için enjekte etmeyin. Dolguyu diğer ürünlerle karıştırmayın. Tekrar sterilize etmeyin.

Ürün sadece tek kullanım için tasarlanmıştır. 2 ile 25 °C arasında ve ısı kaynaklarından uzakta saklayınız. Dondurmayın.

Kullanıldıktan sonra KARISMA, yürürlükteki mevzuata uygun olarak derhal imha edilmelidir. Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.

DOZAJ VE UYGULAMA

KARISMA'yı üretici tarafından sağlanan enjeksiyon tekniğine göre oda sıcaklığında ve sıkı aseptik koşullar altında enjekte edin.